

## DOSSIER TECNICO

# LEUKOPOR

## CEROTTO IN NASTRO TNT CON ADESIVO IPOALLERGENICO

<b>DESCRIZIONE</b>	Cerotto adesivo in tessuto non tessuto, molto ben tollerato anche da pelli estremamente sensibili. Leukopor è permeabile all'aria e al vapore acqueo. Resecabile con le mani. La rimozione è facile e non lascia residui di adesivo sulla cute.
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto: tessuto non tessuto bianco di poliestere e viscosa (peso: $35 \pm 3$ g/m <sup>2</sup> ) Massa adesiva: adesivo poliacrilato (peso: $46 \pm 3$ g/ m <sup>2</sup> ), ipoallergenico <b>La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergico</b>
<b>INDICAZIONI D'USO</b>	Per fissaggio di medicazioni, di elettrodi ed altri apparecchi diagnostici e terapeutici.
<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO</b>	Per pelli estremamente sensibili. Buon potere adesivo iniziale e permanente. Rimozione indolore senza rilascio di residui. Facilmente resecabile con le mani. Radiotrasparente, chimicamente inerte alla gomma e alla plastica. Flessibile, si adatta perfettamente ad ogni parte del corpo, anche a profili tortuosi. Permeabile all'aria. Termostabile tra -20°C e +70°C:
<b>PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO</b>	>1000 g/m <sup>2</sup> /24h
<b>PERMEABILITA' ALL'ARIA</b>	>1000 cm <sup>3</sup> / cm <sup>2</sup> /24h
<b>ADESIVITA'</b>	1,2 – 2,6 N/cm ad acciaio
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Uno o più giorni in funzione dello stato della lesione e delle condizioni della cute.
<b>METODO DI STERILIZZAZIONE</b>	Il prodotto non è sterile ma è sterilizzabile utilizzando ossido di etilene o irradiazioni raggi gamma.
<b>RADIOTRASPARENZA</b>	Il prodotto è radiotrasparente
<b>CARICO MINIMO DI ROTTURA</b>	45 – 68 N/50mm
<b>ESTENSIBILITA'</b>	10 – 20%

continua

## DOSSIER TECNICO

# LEUKOPOR

## CEROTTO IN NASTRO TNT CON ADESIVO IPOALLERGENICO

Continuazione/2

<b>CONFEZIONE</b>	Unità d'uso: cerotto a nastro con rochetto in plastica. Unità di vendita: confezione di un numero variabile di cerotti a seconda delle misure, con marchio CE e codice a barra. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara grazie al nome stampato all'interno del rochetto	
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 5 anni.	
<b>CODICE CND</b>	M050101 Cerotto a nastro	
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE integrata dalla direttiva 2007/47/CE – Dispositivo medico – Classe I	
<b>NUMERO DI REPERTORIO</b>	<b>VECCHIO N. REPERTORIO</b>	<b>NUOVO N. REPERTORIO</b>
	Cod. 02453-00; 18773/R	Cod. 02453-00; 1923732
	Cod. 02454-00; 1781256/R	Cod. 02454-00; 1923734
	Cod. 02455-00; 1781257/R	Cod. 02455-00; 1923735
<b>FABBRICANTE</b>	BSN medical GmbH, Quickbornstrasse 24, 20253 Amburgo, Germania	
<b>DISTRIBUITO DA</b>	Sede legale italiana: Essity Italy S.p.A. - Via XXV Aprile n.2 55011 Frazione Badia Pozzeveri- Altopascio (LU) Sede operativa italiana: Essity Italy S.p.A. - via S. Quasimodo, 12 - 20025LEGNANO (MI)	

CODICI ESTESI	CODICI BREVI	DIMENSIONE (cm x m)	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARI O (unità di vendita)	CONF. SECONDARIO (imballo di magazzino)
02453-00000-08	02453-00	1,25 x 9,2	1 rochetto	24 rochetti	10 scatole da 24 rochetti
02454-00000-08	02454-00	2,5 x 9,2	1 rochetto	12 rochetti	10 scatole da 12 rochetti
02455-00000-08	02455-00	5 x 9,2	1 rochetto	6 rochetti	10 scatole da 6 rochetti

Ultimo aggiornamento: 21/05/2020