

## SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

### AMPOLLA NEBULIZZATRICE IN VETRO

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.002	101	1574874	R0680

### IMMAGINE



### DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcina nasale o boccaglio).

### MATERIALI

Vetro Borosilicato Duran 50 3.3 prodotto dalla Schott ad alta resistenza idrolitica.

### SPECIFICHE TECNICHE

Capacità Massima	7 ml
Pressione minima in uso	0,5 bar
Pressione max. in uso	1,8 bar

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente il nebulizzatore in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso oppure mediante bollitura. Sterilizzare mediante autoclave.

### AVVERTENZE


Tenere lontano dalla portata dei bambini perché l'eventuale rottura provocherebbe una proiezione di schegge pericolose.

Nebulizzatore in vetro, manipolare con cura.

Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente il dispositivo per verificarne l'integrità, la pulizia dei fori di passaggio dell'aria e del prodotto medicinale.

Conservare il nebulizzatore in un luogo sicuro, possibilmente avvolto in un panno di protezione asciutto e pulito.

Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

<b>Distributori</b> <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
<b>Campo di applicazione</b> <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
<b>Conformità</b> <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 ( <i>Medical Device Class IIa, in compliance with Directive 93/42 EEC</i> )