

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO**AMPOLLA NEBULIZZATRICE IN POLIPROPILENE**

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.003	123	1575002	R0680

IMMAGINE**DESCRIZIONE GENERALE**

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcina nasale o boccaglio).

MATERIALI

Polipropilene PURELL HP371P

Additivo colorante RIFRATENE PE BLU DL/24 FNT

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità Massima	7 ml
Pressione minima in uso	0,6 bar
Pressione max. in uso	1,7 bar

PULIZIA E DISINFEZIONE

Dopo l'uso svitare l'ampolla e pulire tutte le parti con acqua tiepida e detergente neutro, risciacquare con cura e lasciare asciugare su un panno pulito.

Per l'eventuale disinfezione utilizzare prodotti sterilizzanti seguendo le istruzioni del prodotto stesso.

Non pulire con acqua bollente, né sterilizzare a vapore.

Conservare in luogo asciutto e pulito lontano dai raggi solari.


AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini sotto i 6 anni perché contiene parti che possono essere ingerite. Manipolare con cura.

L'ampolla è un dispositivo mono-paziente.

Si consiglia di usare l'ampolla per 90 trattamenti al massimo.

Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Distributori <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 (<i>MedicalDevice Class IIa, in compliance with Directive 93/42 EEC</i>)