

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

FORCELLA NASALE IN VETRO PER ADULTI

COD	REF	RDM	CND
FOR.002.004	202	1575223	R03010380

IMMAGINE



DESCRIZIONE GENERALE

Dispositivo predisposto esclusivamente alla nebulizzazione di medicinali in particelle per consentire la perfetta penetrazione fino alle più profonde vie respiratorie.

La nebulizzazione avviene mediante l'immissione di aria nell'ampolla attraverso un apparecchio per aerosol terapia e la somministrazione avviene tramite l'utilizzo dell'accessorio di cura più adatto (maschera, forcella nasale o boccaglio).

MATERIALI

Vetro Borosilicato Duran 50 3.3 prodotto dalla Schott ad alta resistenza idrolitica.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità Massima	7 ml
Pressione minima in uso	0,5 bar
Pressione max. in uso	1,8 bar

PULIZIA E DISINFEZIONE

Al termine di ogni applicazione lavare accuratamente la forcella in acqua corrente e sanificare con prodotti igienizzanti seguendo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto stesso oppure mediante bollitura. Sterilizzare mediante autoclave.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini perché l'eventuale rottura provocherebbe una proiezione di schegge pericolose.

Forcella in vetro, manipolare con cura.

Prima di ogni utilizzo esaminare visivamente il dispositivo per verificarne l'integrità, la pulizia dei fori di passaggio dell'aria e del prodotto medicinale.

Conservare il nebulizzatore in un luogo sicuro, possibilmente avvolto in un panno di protezione asciutto e pulito.

Verificare sempre che il dispositivo medico sia adeguato alla terapia inalatoria da effettuare.

Distributori <i>Distributor</i>	For.me.sa Srl
Campo di applicazione <i>Application advice</i>	Adulti (Adults)  Dispositivo a rischio medio di Classe IIa
Conformità <i>Compliance</i>	Dispositivo Medico classe IIa, conforme alla Direttiva CEE 93/42 (<i>MedicalDevice Class IIa, in compliance with Directive 93/42 EEC</i>)