

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO
CIAMBELLA GONFIABILE IN GOMMA - DELUXE (SENZA POMPETTA)

COD.	CND	GMDN	Repertorio (<i>Repertory</i>)
70-508.01 mis.35	V0803	n.d	589030/R
70-508.02 mis.40	V0803	n.d	589031/R
70-508.03 mis.43	V0803	n.d	589033/R
70-508.04 mis.45	V0803	n.d	589034/R

DESCRIZIONE GENERALE

Il presente dispositivo ha lo scopo di alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da malattie sul corpo umano. Il Dispositivo deve essere gonfiato con aria prima dell'uso e al proprio interno non possono essere introdotti liquidi o altre sostanze.

Cuscino gonfiabile con forma ad anello per dare conforto e sostegno a qualsiasi superficie di appoggio; utile soprattutto dopo un intervento chirurgico o in determinate condizioni.

Costruito in gomma resistente a lunga durata.

IMMAGINE PRODOTTO

MATERIALE

- Ciambella: gomma naturale - latex safe
- Pompa per ciambella: si rimanda alla scheda tecnica relativa
- Valvola: rame placcato in zinco
- Tappo: plastica placcata in zinco

COMPOSIZIONE GOMMA

Gomma naturale: 45%

Carbonato di calcio: 34%

Acceleratori della vulcanizzazione: M (2-tiol-Benzotiazole), DM (bis (diphenil disulfide) e tiazolo: 15%

Olio: 5%

Colore in polvere: 1%

Latex safe

PRESSIONE MASSIMA

~ 180 kg

DIMENSIONI

- Ciambella: 40cm x 43cm x 45cm
- Dimensione ciambella da gonfia: 42cm x 45cm x 47cm
- Peso ciambella: 40cm (520g); 43cm (550g); 45cm (600g)
- Spessore ciambella: 1,4mm
- Rubinetto dell'aria: 0,6cm x 0,6cm x 4,10cm
- Pompa per ciambella: si rimanda alla scheda tecnica relativa

ETICHETTATURA

Su sacchetto

PULIZIA

Prima di procedere all'utilizzo del dispositivo, eseguire una pulizia accurata della superficie esterna dello stesso con acqua tiepida e sapone neutro.

Non utilizzare per la detersione né mezzi abrasivi né detergenti diversi da quelli indicati che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Asciugare prestando particolare attenzione alla valvola di gonfiaggio.

Ripetere tale operazione secondo necessità.

Procedere ad un moderato gonfiaggio. Eccessivi rigonfiamenti potrebbero causare rotture e/o danneggiamenti irreversibili.

Appoggiare il dispositivo prima dell'uso su superfici piane.

A fine utilizzo eseguire un'accurata pulizia e conservare il dispositivo sgonfio, al riparo da luce e polvere.

A fine uso conviene svuotarlo dal contenuto d'aria.

In caso di lunghi periodo di inutilizzo si consiglia di lavarlo accuratamente eseguendo conseguentemente una perfetta asciugatura e poi riporlo sgonfio in idoneo ambiente.


AVVERTENZE

Utilizzare solo su cute integra e secondo le indicazioni riportate sul presente foglietto illustrativo. Ogni uso diverso è da considerarsi improprio.

Conservare il dispositivo a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore e polvere.

Smaltire secondo la normativa vigente

CARATTERISTICHE TECNICHE (Technical Specifications):

Fabbricante (Manufacturer):	FOR.ME.SA srl ¹
Campo di applicazione (Application advice):	Adulti (Adults) -  I categoria di rischio - Solo per rischi minori
Conformità (Compliance):	DispositivoMedicoclassel,conformeallaDirettivaCEE93/42(MedicalDevice Class I, in compliance with Directive 93/42 EEC)