

Mascherina medica chirurgica monouso TYPE IIR

Composizione: tre strati 2 veli TNT 100% polipropilene

1 velo Melt Blown

potere filtrante - BFE \geq 98%

Dimensioni: 17.5 cm x 9,5 cm

Classificazione prodotto: Mascherina facciale monouso medico di Tipo IIR non sterile

Standard applicato: EN 14683:2019 - ISO 10993-1

Istruzioni

- 1 - Lava accuratamente le mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base di alcol prima di indossare la mascherina
- 2 - Indossa la mascherina impugnandola dagli elastici laterali.
- 3 - Nel coprire la bocca e il naso, assicurati che non ci siano spazi tra il viso e la mascherina in modo che aderisca bene al volto.
- 4 - Evita di toccare la mascherina durante l'uso e sostituiscila con una nuova non appena è umida.
- 5 - Rimuovi la mascherina dalle estremità laterali senza toccare la parte anteriore.
- 6 - Subito dopo l'uso buttala in un apposito contenitore.
- 7 - Lava subito le mani con acqua e sapone o gel igienizzante.

Manutenzione: non necessaria in quanto prodotto monouso.

Distributore: Oulide Group srl

Strada Parco della Marinella, 18

50013 Campi Bisenzio (FI)

P.IVA 06636220482

Tel. 055.8974525 - info@oulide.it

Numero Verde 1199114141



8 056157 199977

CE