

CINTURA SUPPORTFLEX CM 27 - 0106

COD. 0106

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.



TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. vita in cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 61 a 75	R	908220419	8054382240563
da 76 a 90	S	908220421	8054382240570
da 91 a 105	T	908220433	8054382240587
da 106 a 120	U	908220445	8054382240594

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Affezioni reumatiche articolari

Funzione principale del Dispositivo Medico

Mantenere il calore naturale dell'organismo.

Caratteristiche

Questa cintura è confezionata con la massima cura impiegando solamente lana, cotone e morbidissimo filato elastico.

Rallenta lo scambio termico con l'ambiente esterno grazie alla particolare costruzione del tessuto elastico isolante.

Composizione Tessile

85% lana

11% cotone

4% gomma

Come si indossa

Indossare la cintura avendo cura di posizionare la cucitura al centro della colonna vertebrale.

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e le autorità competenti.

Contiene lattice di gomma naturale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare.