



CINTURA ULTRACONTENTITIVA CM 28 - 0109

COD. 0109

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI

 Punti di misurazione



Circonf. vita in cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 72 a 80	A/3	908220561	8054382240648
da 81 a 89	A/4	908220573	8054382240655
da 90 a 99	A/5	908220585	8054382240662
da 100 a 109	A/6	908220597	8054382240679
da 110 a 119	A/7	908220609	8054382240686
da 120 a 130	A/8	908220611	8054382240693

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Affezioni reumatiche articolari

Funzione principale del Dispositivo Medico

Mantenere il calore naturale dell'organismo

Caratteristiche

Questa cintura è realizzata impiegando lana, cotone e morbidissimo filato elastico

Il tessuto elastico isolante rallenta lo scambio termico con l'ambiente esterno

Composizione Tessile

64% lana

25% cotone

11% gomma

Come si indossa

Indossare la cintura posizionando la cucitura al centro della colonna vertebrale

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore. In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Contiene lattice di gomma naturale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.