

# CINTURA POST-OPERATORIA CLASSICA - 0116

COD. 0116

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.



**TAGLIE DISPONIBILI**



Punti di misurazione



Circonf. vita in cm	Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 60 a 65	26	1	975427143	8054382241188
da 65 a 75	26	2	975427182	8054382241195
da 75 a 85	26	3	975427194	8054382241201
da 85 a 95	26	4	975427206	8054382241218
da 95 a 105	26	5	975427218	8054382241225
da 105 a 115	26	6	975427220	8054382241232
da 115 a 125	26	7	975427232	8054382241249

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

## Indicazioni

Fase post-operatoria in caso di interventi chirurgici addominali  
Fase post-partum

## Caratteristiche

Dotata di chiusura a strappo per consentire una corretta aderenza

Non scivola e non si arrotola

## Composizione Tessile

47% cotone

28% poliestere

25% gomma

## Come si indossa

Indossare la cintura elastica nella regione addominale regolando la chiusura a strappo secondo la tensione desiderata.

## Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti tessili del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Contiene lattice di gomma naturale.