



ACTION V - CORSETTO LOMBOSACRALE - 0128

COD. 0128

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i. Distribuito da Dual Sanitaly S.p.A.



TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. vita su maglia cm	Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 78 a 89	26.5	1	906953361	3322549641016
da 90 a 101	26.5	2	906953447	3322549641023
da 102 a 114	26.5	3	906953474	3322549641030
da 115 a 128	26.5	4	906953486	3322549641047
da 129 a 143	26.5	5	925517169	3322541023223

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Condizioni del tratto lombare che possono beneficiare della limitazione dei movimenti, come:

- lombalgia di natura muscolare
- distorsione lumbosacrale
- lombalgia cronica
- sciatalgia

Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce una maggiore stabilità e una limitazione dei movimenti del tratto lombare della colonna vertebrale. Inoltre procura un sollievo dal dolore lombare.

Caratteristiche

Sostegno rigido dotato di steccaggio, per la concentrazione delle forze sulla regione lombare ottenuta dal sistema di fasce a V. Tessuto aerato leggero per una riduzione della sudorazione e una vestibilità confortevole. Due stecche addominali rimovibili con sistema di anti arrotolamento.

Composizione Tessile

Poliammide, Poliestere, Gomma, Cotone

Stecche: acciaio

Come si indossa

Indossare il corsetto sopra la biancheria intima o un indumento leggero. Orientare il vertice dell'incrocio a V verso il basso. Posizionare il corsetto in modo che sia centrato rispetto alla colonna lombare e il bordo inferiore risulti all'altezza del coccige. Verificare che il prodotto sia aderente al tratto lombare e, se necessario, modellare le stecche. Esercitare una trazione simmetrica e chiudere il corsetto con l'apposita chiusura a strappo.

Controindicazioni

Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Si consiglia la dismissione graduale del dispositivo medico, eventualmente combinata con fisioterapia funzionale.

I pazienti che soffrono di debolezza del pavimento pelvico devono consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo medico.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

Contiene lattice di gomma naturale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.