

LOMBOGIB® SENIOR - CORSETTO LOMBOSACRALE - 0134

COD. 0134

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i. Distribuito da Dual Sanitaly S.p.A.



TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. vita su maglia cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 70 a 80	0	974161869	3322541039781
da 80 a 90	1	974161871	3322541039798
da 90 a 100	2	974161883	3322541039804
da 100 a 110	3	974161895	3322541039811
da 110 a 125	4	974161907	3322541039828

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Condizioni del tratto lombare che possono beneficiare della limitazione dei movimenti, come:

- lombalgia di natura muscolare
- distorsione lombosacrale
- lombalgia cronica
- sciatalgia

Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce una maggiore stabilità e una limitazione dei movimenti del tratto lombare della colonna vertebrale. Inoltre procura un sollievo dal dolore lombare.

Caratteristiche

Doppia chiusura con sistema a puleggia, adatta per chi non è in grado di sviluppare una intensa forza muscolare.

Quattro stecche rigide posteriori modellabili.

Rinforzo lombosacrale amovibile utile per alleggerire la sensazione di compressione a livello delle creste iliache.

Tessuto traforato per una migliore aerazione e leggerezza.

Composizione Tessile

Poliammide, Poliestere, Gomma, Poliuretano, Acciaio, POM

Stecche: acciaio

Come si indossa

Indossare il corsetto di sostegno sopra una maglia leggera. Staccare i due passadito e posizionare il corsetto in modo che il logo Gibaud risulti sulla parte laterale destra. L'apertura posteriore dovrà essere centrata rispetto alla colonna vertebrale. Il bordo inferiore del corsetto dovrà essere all'altezza del coccige. Chiudere il corsetto, infilare i pollici nei due fori passadito e tendere i tiranti in avanti fino ad ottenere una chiusura forte ma confortevole. Agganciare i passadito sulla parte anteriore del corsetto tramite le chiusure a strappo partendo da quella di sinistra.

Controindicazioni

Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

Contiene lattice di gomma naturale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.