

Dr. GIBAUD®

LOMBOGIB® LADY - CORSETTO LOMBOSACRALE - 0136

COD. 0136

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i. Distribuito da Dual Sanitaly S.p.A.



TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. vita su maglia cm	Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 70 a 80	26.5	0	972522837	3322541042453
da 80 a 90	26.5	1	972525149	3322541042460
da 90 a 100	26.5	2	972525152	3322541042477
da 100 a 110	26.5	3	972525164	3322541042484
da 110 a 125	26.5	4	972525176	3322541042491
da 125 a 140	26.5	5	972525188	3322541042507

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Condizioni del tratto lombare che possono beneficiare della limitazione dei movimenti, come:

- lombalgia di natura muscolare
- distorsione lumbosacrale
- lombalgia cronica
- sciatalgia

Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce una maggiore stabilità e una limitazione dei movimenti del tratto lombare della colonna vertebrale. Inoltre procura un sollievo dal dolore lombare.

Caratteristiche

Steccaggio posteriore a V brevettato con azione di richiamo dinamico.

Tessuto brevettato aerato Aeralis® traspirante, leggero e con la parte interna in microfibra. Le caratteristiche del tessuto Aeralis® consentono di indossare la cintura anche a diretto contatto della pelle.

Forma anatomica adatta alla morfologia femminile.

Disponibile anche nell'altezza cm 21 (cod. [0139](#))

Composizione Tessile

Poliammide, Poliестere, Elastan, Poliuretano

Stecche: acciaio

Come si indossa

Indossare il corsetto sopra un indumento leggero o a diretto contatto con la pelle.

Orientare il vertice dello steccaggio a V verso il basso.

Posizionare il corsetto in modo che sia centrato rispetto alla colonna lombare e il bordo inferiore risulti all'altezza del coccige.

Verificare che il corsetto sia aderente al tratto lombare e, se necessario, modellare le stecche.

Esercitare una trazione simmetrica e chiudere il corsetto con l'apposita chiusura a strappo.

Controindicazioni

Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Si consiglia la dismissione graduale del dispositivo medico, eventualmente combinata con fisioterapia funzionale.

I pazienti che soffrono di debolezza del pavimento pelvico devono consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo medico.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare delicatamente a 30° C, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.