



GINOCCHIERA ELASTICA CAMEL - 0504

COD. 0504

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. ginocchio cm	Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 30 a 35	24	1	908480775	8054382241645
da 36 a 39	24	2	908480787	8054382241652
da 40 a 44	24	3	908480799	8054382241669
da 45 a 49	24	4	908480801	8054382241676
da 50 a 53	24	5	902279886	8054382241683

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Riduzione del rischio di distorsione di ginocchio

Postumi di distorsione di lieve entità di ginocchio

Controindicazioni

Traumi in fase acuta

Caratteristiche

Propriocezione: contribuisce a mantenere inalterata la percezione del ginocchio nello spazio

Composizione Tessile

44% cotone

21% viscosa

16% poliammide

14% gomma

5% elasthan

Come si indossa

Indossare la ginocchiera avendo cura di posizionare la parte centrale della stessa sopra la rotula

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti tessili del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Contiene lattice di gomma naturale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.