

GIBAUD<sup>†</sup>

# GINOCCHIERA COTONE SOTTILE - 0513

COD. 0513

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

## TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. ginocchio cm	Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 30 a 35	24	1	908621283	8054382241690
da 36 a 39	24	2	908621295	8054382241706
da 40 a 44	24	3	908621319	8054382241713
da 45 a 49	24	4	908621321	8054382241720

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

## Indicazioni

Riduzione del rischio di distorsione di ginocchio

Postumi di distorsione di lieve entità di ginocchio

## Controindicazioni

Traumi in fase acuta

## Caratteristiche

Propriocezione: contribuisce a mantenere inalterata la percezione del ginocchio nello spazio

## Composizione Tessile

68% cotone

21% poliammide

11% elasthan

## Come si indossa

Indossare la ginocchiera avendo cura di posizionare la parte centrale della stessa sopra la rotula

## **Avvertenze e precauzioni di impiego**

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti tessili del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

## **Istruzioni per il lavaggio**

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.