



# ROTULGIB® 3D GINOCCHIERA ROTULEA - 0518

COD. 0518

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

## TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. ginocchio cm	Circonf. coscia misurata 15 cm sopra il ginocchio in cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 28 a 33	36-41	1	981979255	3322541065865
da 33 a 38	41-46	2	981979267	3322541065872
da 38 a 43	46-51	3	981979279	3322541065889
da 43 a 48	51-56	4	981979281	3322541065896
da 48 a 53	56-61	5	981979293	3322541065902
da 48 a 53	61-66	5+	981979317	3322541065926

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

## Indicazioni

Condizioni del ginocchio che possono beneficiare della compressione, come:

- lievi distorsioni e stiramenti
- ginocchio doloroso
- sensazione di instabilità
- condromalacia (degenerazione cartilaginea a seguito di traumi o sovraccarichi)
- tendinopatia rotulea
- osteoartrite patello-femorale

## Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce una compressione di Classe 3 (Francese), un effetto propriocettivo e un riallineamento della rotula.

## Caratteristiche

Centraggio e stabilizzazione rotulea con pressione tendineo garantiti da un anello viscoelastico adattabile alla forma del ginocchio.

Rivestimento del centraggio rotuleo in silicone termosaldato.

Zona di decompressione traspirante a livello del cavo popliteo (parte posteriore del ginocchio).

Orlo superiore in Silicotex® con effetto antiscivolo.

Tessuto compressivo realizzato con 3D Motion Technology

## **Composizione Tessile**

Poliammide, Poliestere, Elastan, Poliuretano, Silicone, TPE-S

## **Come si indossa**

Indossare la ginocchiera posizionando il centraggio rotuleo in corrispondenza della rotula.

Si consiglia di infilare la ginocchiera mantenendo rivoltato l'orlo siliconato all'altezza della linea blu di riferimento.

## **Controindicazioni**

Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata.

## **Avvertenze e precauzioni di impiego**

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

Quando si regolano le cinghie, tenderle in modo che siano stabili ma confortevoli.

Il tutore non deve essere utilizzato nel caso in cui sia necessaria una immobilizzazione relativa, assoluta o l'operazione chirurgica.

In caso di problemi circolatori agli arti inferiori (es diabete o insufficienza vascolare periferica), si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo medico.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

## **Istruzioni per il lavaggio**

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.