



# ARTIGIB® 3D GINOCCHIERA LEGAMENTI - 0519

COD. 0519

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

## TAGLIE DISPONIBILI



Circonf. ginocchio cm	Circonf. coscia misurata 15 cm sopra il ginocchio in cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 28 a 33	36-41	1	981979103	3322541065797
da 33 a 38	41-46	2	981979115	3322541065803
da 38 a 43	46-51	3	981979127	3322541065810
da 43 a 48	51-56	4	981979139	3322541065827
da 48 a 53	56-61	4+	981979141	3322541065841
da 48 a 53	56-61	5	981979154	3322541065834
da 48 a 53	61-66	5+	981979166	3322541065858

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

## Indicazioni

Condizioni del ginocchio che possono beneficiare della compressione, come:

- lievi distorsioni e stiramenti
- ginocchio doloroso
- sensazione di instabilità
- condromalacia (degenerazione cartilaginea a seguito di traumi o sovraccarichi)
- tendinopatia rotulea

## Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce una compressione di Classe 3 (Francese), un effetto propriocettivo e un riallineamento della rotula.

## Caratteristiche

Steccaggio laterale a spirale per la stabilizzazione dell'articolazione.

Anello in silicone di stabilizzazione e centraggio della rotula.

Rivestimento del centraggio rotuleo in silicone termosaldato.

Zona di decompressione a livello rotuleo.

Zona di decompressione traspirante a livello del cavo popliteo (parte posteriore del ginocchio).

Orlo superiore in Silicotex® con effetto antiscivolo.

Tessuto compressivo realizzato con 3D Motion Technology.

## Composizione Tessile

Poliammide, Poliestere, Elastan, Poliuretano, Silicone, TPE-S

Stecche: acciaio

## Come si indossa

Indossare la ginocchiera posizionando il centraggio rotuleo in corrispondenza della rotula. Si consiglia di infilare la ginocchiera mantenendo rivoltato l'orlo siliconato all'altezza della linea blu di riferimento.

## Controindicazioni

Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata.

## Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Il tutore non deve essere utilizzato nel caso in cui sia necessaria una immobilizzazione relativa, assoluta o l'operazione chirurgica.

In caso di problemi circolatori agli arti inferiori (es diabete o insufficienza vascolare periferica), si consiglia di consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo medico.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

## Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.