



CAVIGLIERA CALZINO CAMEL - 0603

COD. 0603

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. in cm sopra la caviglia	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 19 a 21	1	908188954	8054382241515
da 21 a 23	2	908188966	8054382241522
da 23 a 25	3	908188978	8054382241539
da 25 a 27	4	908188980	8054382241546

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Riduzione del rischio di distorsione di caviglia

Postumi di distorsione di lieve entità di caviglia

Controindicazioni

Traumi in fase acuta

Caratteristiche

Propriocezione: contribuisce a mantenere inalterata la percezione della caviglia nello spazio

Composizione Tessile

60% cotone

27% poliammide

13% elasthan

Come si indossa

Indossare il prodotto come una calza.

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti tessili del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.