

# MALLEOGIB® 3D CAVIGLIERA LEGAMENTI - 0604

COD. 0604

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.



## TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. caviglia in cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 18 a 20	1	981979178	3322541065711
da 20,5 a 23	2	981979180	3322541065728
da 23,5 a 26	3	981979192	3322541065742
da 26,5 a 29	4	981979204	3322541065735
da 29,5 a 32	5	981979216	3322541065759

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

## Indicazioni

Condizioni della caviglia che possono beneficiare della compressione, come:

- riabilitazione da lesioni alla caviglia
- lievi distorsioni o stiramenti
- lieve instabilità

## Funzioni principali del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce una compressione di Classe 3 (Francese), un effetto propriocettivo e un supporto alla caviglia.

## Caratteristiche

Sistema brevettato di bende elastiche di richiamo dinamico esterno ad effetto anti-varo

Tessuto 3D Motion Technology studiato per il migliore adattamento alla forma della caviglia

Confortevoli cuscinetti di protezione malleolare

Zona con tessuto traforato in corrispondenza del collo del piede

Cavigliera ambidestra

## Composizione Tessile

Poliammide, Poliesteri, Gomma, Elastan, Poliuretano, Cotone

## **Come si indossa**

Infilare la cavigliera come un calzino in modo che il logo GIBAUD risulti sulla parte superiore della caviglia.

Assicurarsi che i cuscinetti di protezione siano posizionati in corrispondenza dei malleoli.

Applicare la benda elastica in corrispondenza del tassello in velluto presente sul dorso del piede. **ATTENZIONE:** assicurarsi che il simbolo del piede corrisponda al piede da trattare (simbolo del piede destro sul piede destro, simbolo del piede sinistro sul piede sinistro).

Tirare la benda nel senso indicato dalla freccia riportato sul simbolo del piede e, tirandola in maniera uniforme, farla ruotare prima sotto la pianta del piede e successivamente al di sopra in modo che il tondino di velluto risulti centrato sul dorso del piede.

Proseguire il movimento di rotazione facendo passare il tallone nell'asola delle due cinghie.

Fissare l'estremità della cinghia sul tondino di velluto.

## **Controindicazioni**

Non utilizzare nei casi in cui la compressione è controindicata.

## **Avvertenze e precauzioni di impiego**

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Quando si regola la cinghia, tenderla in modo che sia stabile ma confortevole.

Il tutore non deve essere utilizzato nel caso in cui sia necessaria una immobilizzazione relativa, assoluta o l'operazione chirurgica.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità alle componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

Contiene lattice di gomma naturale.

## **Istruzioni per il lavaggio**

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.