



CAVIGLIERA CALZINO SOTTILE - 0612

COD. 0612

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. in cm sopra la caviglia	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 19 a 21	1	908494432	8054382241591
da 21 a 23	2	908494444	8054382241607
da 23 a 25	3	908494457	8054382241614
da 25 a 27	4	908447168	8054382241621
da 27 a 29	5	902279924	8054382241638

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Riduzione del rischio di distorsione di caviglia

Postumi di distorsione di lieve entità di caviglia

Controindicazioni

Traumi in fase acuta

Caratteristiche

Propriocezione: contribuisce a mantenere inalterata la percezione della caviglia nello spazio

Composizione Tessile

50% cotone

29% poliammide

21% elasthan

Come si indossa

Indossare il prodotto come una calza.

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Utilizzare una protezione cutanea in caso di lesioni dermatologiche, forme allergiche o ipersensibilità ai componenti tessili del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.