



MALLEOCROSS® - CAVIGLIERA GRADUALE - 0614

COD. 0614

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. cm caviglia misur. sui malleoli	Altezza dal tallone in cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 20 a 22	11	1	977962226	8054382242628
da 22 a 24	11	2	977962240	8054382242635
da 24 a 26	11	3	977962265	8054382242642
da 26 a 28	11	4	977962289	8054382242659
da 28 a 30	11	5	977962315	8054382242666

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Trattamento funzionale di:

- Distorsione lieve e di media gravità di caviglia
- Postumi di distorsioni
- Lassità legamentosa cronica

Stabilizzazione e protezione durante l'attività sportiva.

Prevenzione delle distorsioni recidivanti.

Composizione Tessile

Poliammide, gomma

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

Caratteristiche

Cavigliera con tessuto ad alto grado contenitivo e protezioni malleolari.

Benda di stabilizzazione a "8" con protezione del collo del piede.

Chiusura a strappo anteriore e cinturino elastico superiore.

La cavigliera può essere indossata anche senza benda di stabilizzazione.

La cavigliera è ambidestra.