



CAVIGLIERA STABIGIB® BIVALVA - 0616

COD. 0616

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI

Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
Altezza cm 26	taglia unica	903628257	3322542004641

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

- distorsioni acute da lievi a severe
- instabilità cronica
- fase successiva all'ingessatura o all'uso del dispositivo medico Walker
- riabilitazione a seguito di lesioni e/o uso post-chirurgico

Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce una limitazione dei movimenti in inversione ed eversione della caviglia.

Il dispositivo medico migliora la propriocezione.

Caratteristiche

Cavigliera a valve rigide, simmetriche e invertibili

Imbottitura lavabile e adattabile alla forma del piede

Talloniera regolabile

Chiusure a strappo

Calzata ideale per l'inserimento all'interno della scarpa

Cavigliera ambidestra

Composizione Tessile

Poliammide, Poliuretano, Poliestere, POM, Acciaio

Come si indossa

Per regolare la distanza tra le due valve, a livello del tallone, agire sulle cinghie laterali.

Posizionare le valve su entrambi i lati della caviglia, in modo che i malleoli siano coperti.

Per maggior comodità si consiglia di mantenere le fibbie sul lato esterno della gamba. Stringere la cinghia inferiore. Infilare il piede su cui è indossata la cavigliera in una calzatura comoda e stabile. Allacciare la scarpa. Stringere la cinghia superiore.

Qualora le cinghie si allentino occorrerà stringerle nuovamente.

Se si avverte un dolore o un disturbo localizzato, allentare le cinghie e riposizionare le valve.

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Quando si regolano le cinghie, tenderle in modo che siano stabili ma confortevoli.

Il tutore non deve essere utilizzato nel caso in cui sia necessaria una immobilizzazione relativa, assoluta o l'operazione chirurgica.

L'uso della cavigliera è sconsigliato durante la guida di veicoli.

Utilizzare una calzatura quando si cammina all'aperto o durante l'attività sportiva.

Evitare di camminare con la cavigliera su superfici scivolose e umide senza una calzatura.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

Istruzioni per il lavaggio

Pulire le parti in plastica con un panno umido. Le protezioni laterali rimovibili possono essere lavate a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.