



.GIBAUD†

POLSINO RIGHE BEIGE CM 6 - 0704

COD. 0704

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Circonf. polso in cm	Altezza cm	Taglia	Codice parf.	Codice UDI-DI
15 - 19	6	0	908478047	8054382241836
20 - 24	6	1	908478062	8054382241843
25 - 29	6	2	908478074	8054382241850
30 - 34	6	3	901312429	8054382241867

Le eventuali misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di +/- 1 cm

Indicazioni

Postumi di distorsione di lieve entità del polso

Controllo dell'articolazione per effetto propriocettivo

Controindicazioni

Traumi in fase acuta

Caratteristiche

Propriocezione: contribuisce a mantenere attiva la percezione del polso nello spazio.

Contenzione regolabile grazie alla chiusura a strappo.

Composizione Tessile

89% cotone

11% gomma

Come si indossa

Posizionare il prodotto sul polso utilizzando la chiusura a strappo per regolare l'intensità di contenzione.

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dal calore eccessivo e dalla luce. Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Non utilizzare in caso di forme allergiche o ipersensibilità ai componenti del prodotto.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

Contiene lattice di gomma naturale.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.