



GIBAUD

TUTORE DITA - 0736

COD. 0736

Dispositivo Medico Classe I Reg. (UE) 2017/745 e s.m.i.

TAGLIE DISPONIBILI



Punti di misurazione



Distanza dalla punta delle dita lesionate al polso in cm	Altezza cm	Taglia	Codice paraf.	Codice UDI-DI
da 0 a 13	18.5	1	982054049	3322541071088
da 13 a 17	22.5	2	982054203	3322541071095
da 17 a 20	24.5	3	982054215	3322541071101
da 20 a 23	28.5	4	982054227	3322541071118

Indicazioni

Traumi delle dita lunghe della mano che possono beneficiare dell'immobilizzazione, come:

- distorsioni
- stiramenti
- lussazioni
- fratture composte

Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico fornisce l'immobilizzazione e l'efficace trattamento delle lesioni delle dita lunghe della mano.

Caratteristiche

Steccaggio dita-polso, modellabile per mantenere in flessione le articolazioni metacarpo-falangea e interfalangea prossimale

Utilizzabile in posizione palmare o dorsale

Cinghia distale e prossimale fisse e due cinghie intermedie riposizionabili

Composizione Tessile

EVA, poliammide, poliestere, poliuretano

Stecca: alluminio

Come si indossa

Aprire le quattro cinghie. Posizionare sulla stecca il dito lesionato insieme al dito vicino più lungo. Chiudere la cinghia all'estremità delle dita e quella del polso. Stringere le cinghie intermedie, una intorno alle dita e l'altra intorno alla mano. Queste due cinghie si possono riposizionare lungo le chiusure a strappo.

Salvo prescrizione medica contraria, si consiglia di modellare la stecca per ottenere una flessione dell'articolazione metacarpo-falangea di 60°-70°, quella inter-falangea prossimale di 10°-20° e quella inter-falangea distale in estensione.

Avvertenze e precauzioni di impiego

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Non prolungare l'uso del prodotto senza il consiglio del medico.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Quando si regolano le cinghie, tenderle in modo che siano stabili ma confortevoli.

Il tutore non deve essere utilizzato nel caso in cui sia necessaria una immobilizzazione relativa, assoluta o l'operazione chirurgica.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

Istruzioni per il lavaggio

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.