



medi Butler

Gebrauchsanweisung

Zunächst stellen Sie den medi Butler auf eine feste Unterlage. Die breitere Seite des Standfußes zeigt dabei zu Ihnen und die Öffnung des halbkreisförmigen Schaftbogens nach vorne.

Legen Sie den Kompressionsstrumpf in den Einstiegsbügel ein. Die Strumpfspitze zeigt dabei nach vorne. Schlagen Sie den oberen Rand des Strumpfes nach außen über den Schaftbogen (Abb. 1).

Streifen Sie den Strumpf so weit über den Einstiegsbügel, bis die Fußspitze am Bügelrand erscheint (Abb. 2).

Stellen Sie nun den medi Butler auf den Boden. Schlüpfen Sie mit den Zehen voran in die Fußspitze des Strumpfes. Zur Stabilisierung ist zu empfehlen, sich an einem festen Gegenstand abzustützen (z.B. Tisch, Wand) (Abb. 3).

Nun können Sie mit dem Fuß in den festen Stand „durchtreten“. Noch mal kurz kontrollieren, ob Fußspitze und Ferse auch richtig sitzen (Abb. 4).

Durch wiederholtes Ziehen und Nachgeben an beiden Haltegriffen, können Sie den Strumpf nun bequem Richtung Knie streifen (Abb. 5).

Unterhalb des Knies kippen Sie den medi Butler einfach leicht nach hinten weg und stellen ihn zur Seite (Abb. 6).

Zum Schluss streifen Sie den Kompressionsstrumpf gleichmäßig nach oben. Dabei bitte darauf achten, den Strumpf Stück für Stück nach oben zu legen, ohne ihn zu raffen oder zu ziehen (Abb. 7).

Tipps:

- Vorsicht bei scharfen Fingernägeln und Schmutz! Um Schäden an dem feinem Gestrick und Verletzungen zu vermeiden, bitte auf gepflegte Nägel achten. Greifen Sie bitte mit den Fingern behutsam in das Gestrick.
- Auf Wunsch können Sie den medi Butler mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.

medi Nederland BV
Heusing 5
4817 ZB Breda
The Netherlands
T +31 76 57 22 555
F +31 76 57 22 565
info@medi.nl
www.medi.nl

medi Norway AS
P.B.238
4291 Kopervik
Norway
T +47 528 44 50 0
F +47 528 44 50 9
post@medinorway.no
www.medinorway.no

medi Polska Sp. z o. o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T+48 32 230 60 21
F+48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

medi Bayreuth Unipessoal, Lda
Rua Eugénio de Castro Rodrigues, nº2
1700-184 Lisboa
Portugal
T +351 21 843 71 60
F +351 21 847 08 33
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.pt

medi RUS LRC
Business Park "Rumyantsevo"
Rumyantsevo, Build. 1
Leninsky Township
142784 Moscow Region
Russia
T +7 495 229 04 58
F +7 495 229 04 58
info@medirus.ru
www.medirus.ru

Distributor:
ELSA Ortopedi Rehabilitasyon Spor
Malz. Iç ve Dis Tic Ltd Sti.
Çaldıran Sokak No:14/A
Kolej/Ankara
Turkey
T 0 312 434 27 94
F 0 312 434 22 82
info@elsa.web.tr
www.elsa.web.tr

medi Sweden AB
Box 6034
192 06 Sollentuna
Sweden
T +46 8 96 97 98
F +46 8 626 68 70
info@medi.se
www.medi.se

medi UK Ltd.
Plough Lane
Hereford HR4 0EL
United Kingdom
T +44 1432 37 35 00
F +44 1432 37 35 10
enquiries@mediuk.co.uk
www.mediuk.co.uk

medi Ukraine LLC
Tankova Str. 8, office 35
Business-center "Flora Park"
Kiev 04112
Ukraine
T +380 44 591 1163
F +380 44 455 6181
office@medi.ua
www.medi.ua

medi USA L.P.
6481 Franz Warner Parkway
Whitsett, N.C. 27377-3000
USA
T +1 336 4 49 44 40
F +1 888 5 70 45 54
orders@mediusa.com
www.mediusa.com

medi Butler

Istruzioni per l'uso

Innanzitutto, mettere il medi Butler su una superficie stabile. Il lato più largo del piede di sostegno è rivolto verso l'utente e l'apertura dell'arco semicircolare in avanti.

Posizionare la calza compressiva nell'archetto di entrata. La punta della calza è rivolta in avanti. Ribaltare all'esterno il bordo superiore della calza al di sopra dell'arco (Fig. 1).

Stendere la calza sull'archetto di entrata, fino a che la punta non compaia sul bordo dell'archetto (Fig. 2).

A questo punto, sistemare il medi Butler sul pavimento. Spingere le dita del piede nella punta della calza. Per migliorare la stabilità, si consiglia di sorreggersi a un oggetto stabile (es. tavolo, parete) (Fig. 3).

Ora è possibile appoggiare il piede in posizione stabile. Controllare di nuovo che la calza sia ben aderente alla punta e al tallone (Fig. 4).

Tirando e rilasciando ripetutamente le impugnature, è possibile ora stendere comodamente la calza in direzione del ginocchio (Fig. 5).

Al di sotto del ginocchio, inclinare lievemente il medi Butler all'indietro e metterlo su di un lato (Fig. 6).

Infine, stendere la calza compressiva uniformemente verso l'alto. Prestare attenzione a stendere la calza verso l'alto una porzione alla volta, senza raccogliarla o tirarla (Fig. 7).

Suggerimenti:

- Attenzione in caso di unghie appuntite o quando si portino anelli o altri oggetti alle mani! Per evitare di danneggiare il delicato tessuto e per prevenire possibili ferite, si consiglia di tenere le unghie ben curate. Maneggiare il tessuto con le dita sempre con molta cautela.
- Se lo si desidera, è possibile pulire il medi Butler con detersivi e disinfettanti normalmente presenti in commercio.