

 **LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE**

## Busto ortopedico elastico basso / alto, per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

### MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

### PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

### AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico.

La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

### ASSORTIMENTO/TAGLIE

Codice	REF. 1770H - REF. 1770S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	20	20	20	20	20	20
Altezza posteriore cm	26	26	26	26	26	26
Colore	REF. 1770H = azzurro / REF. 1770S = nero					

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 20

Codice	REF. 1772H - REF. 1772S					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza vita	50/60	60/75	75/90	90/105	105/120	120/135
Altezza anteriore cm	22	22	22	22	22	22
Altezza posteriore cm	32	32	32	32	32	32
Colore	REF. 1772H = azzurro / REF. 1772S = nero					

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 24

### MANUTENZIONE

-  Non candeggiare
  -  Pulizia chimica non consentita
  -  Non stirare
  -  Non asciugare in asciugatrice
-  Istruzioni per il lavaggio: lavare a mano ad una temperatura di max 30° C con detergente neutro.  
Far asciugare lontano da fonti di calore.  
Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente

### INDICAZIONI

- Lombalgie
- Contratture muscolari paravertebrali
- Solo Linear70: Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale
- Solo Linear72: Traumi lievi alla colonna lombare

### CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

### CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
- Chiusura anteriore a Velcro®
- Rinforzo posteriore lineare
- 2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili, su prescrizione medica
- Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione medica; da inserire nelle 4 guide posteriori.
- Adattabile individualmente alla patologia del paziente

### APPLICAZIONE

- 1 Aprire il busto e posizionarlo in modo che l'etichetta sia rivolta verso l'alto.
- 2 Indossare il busto tendendolo e fissandolo bene con la chiusura a Velcro® centrale. Assicurarsi che la chiusura sia ben centrata (fig. A).
- 3 Se viene prescritto l'utilizzo di una pelota lombare, fissarla alla banda in Velcro® posteriore prima di indossare il busto.

### NOTA:

- Per applicare la pelota rigida posteriore (modellabile a caldo):
- applicare l'imbottitura adesiva alla parte plastica (lato concavo-senza scritte, fig. E)
  - applicare i Velcro® adesivi centralmente, sul lato opposto rispetto all'imbottitura (fig. F)
  - agganciare la pelota tramite Velcro® alla parte dorsale interna del busto

- Per applicare la pelota rigida anteriore (modellabile a caldo):
- applicare l'imbottitura adesiva alla parte plastica (lato concavo-senza scritte)
  - agganciare la pelota tramite Velcro® alla chiusura anteriore del busto

# LINEAR 70



Linear70  
REF. 1770H  
REF. 1770S