

**LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE**

**REF.82300 Stringipolso in neoprene**

**REF.82600 Stringipolso in neoprene con presa pollice**

#### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

#### MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

#### PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

#### AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico.

La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiore, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

#### ASSORTIMENTO/TAGLIE

Codice	REF.82300 / REF.82600
Taglia	Universale
Colore: beige - ambidestro	

#### MANUTENZIONE

- ⚠ Non candeggiare
- ⚠ Pulizia chimica non consentita
- ⚠ Non stirare
- ⚠ Non asciugare in asciugatrice
- 📖 Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30° con sapone neutro; lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

#### INDICAZIONI

##### Object 82300

- Postumi dei traumi distorsivi del polso
- Tendiniti e tenosinoviti
- Patologie degenerative infiammatorie del polso

##### Object 82600

- Postumi dei traumi distorsivi del pollice
- Rizartriosi in fase acuta
- Artrosi del pollice

#### CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

#### CARATTERISTICHE E MATERIALI

##### Object 82300

- Struttura in neoprene bifoderato
- Chiusura a mezzo Velcro®

##### Object 82600

- Struttura in neoprene bifoderato
- Proiezione cilindrica per l'alloggiamento e la stabilità del pollice
- Chiusura a mezzo Velcro®

#### APPLICAZIONE

- 1 Infilare il pollice nell'apposita apertura (A).
- 2 Tenere ben tesa la lingua del polsino sull'interno del polso (B).
- 3 Far girare la fascetta (col Velcro®) intorno al polso e fissare il cinturino di chiusura (C).



REF.82300

**Neoprene wrist support**

REF.82600

**Neoprene wrist support with thumb**

