

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Tutore per spalla con immobilizzazione in abduzione a 45° o 70°

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

SCELTA/DIMENSIONI

Codice	REF. 84500
Taglia	universale
Colore	nero

Ambidestro
Option: REF. 84500/a - asta di appoggio per polso e mano

MANUTENZIONE

- ☒ Non candeggiare ☒ Pulizia chimica non consentita
 - ☒ Non stirare ☒ Non asciugare in asciugatrice
- Istruzioni per il lavaggio: lavare a mano la fodera (dopo aver tolto l'imbottitura in gommasciuma), la fascia e i manicotti in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

- Fratture del trochite omerale con minima dislocazione
- Trattamento della capsulite adesiva dopo mobilizzazione
- Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla
- Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffia dei rotatori
- Lesioni dei nervi

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura cuscino in gommapiuma ad alta densità
- Rivestimento, cintura toracica e manicotti sono in tessuto accoppiato con nylon garzato esterno per attacchi del Velcro®
- Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
- Possibilità di abduzione a 45° o 70°
- Tubolare di protezione a girocollo

PRIMA APPLICAZIONE PER IL MEDICO / TECNICO

- 1 Posizionare il cuscino in modo da garantire l'abduzione desiderata (45° o 70°). Appoggiare il cuscino sul fianco, sopra la cresta iliaca. Stringere attorno alla vita la fascia e fissarla al cuscino con il Velcro® (fig. A).
- 2 Se si utilizza l'asta (optional REF. 84500/A), fissarla al cuscino con l'appoggio per la mano posizionato in avanti (fig. B).
- 3 Posizionare e fissare a Velcro® sul cuscino il manicotto di stabilizzazione dell'omero (fig. C) e successivamente quello di polso (fig. D).
- 4 Chiudere il manicotto di stabilizzazione dell'omero e successivamente quello di polso. Se la posizione del braccio dovesse risultare innaturale, riposizionare i manicotti sul cuscino.
- 5 Fissare posteriormente (fig. E) e anteriormente (fig. F) sul cuscino la cintura girospalla e tenderla facendola scorrere nell'apposita fibbia autobloccante. Assicurarsi che il manicotto di protezione del collo sia posizionato correttamente.

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

- 1 Appoggiare il cuscino sul fianco, sopra la cresta iliaca.
- 2 Stringere attorno alla vita la fascia e fissarla al cuscino con il Velcro® (fig. A).
- 3 Chiudere il manicotto di stabilizzazione dell'omero (fig. C) e successivamente quello di polso (fig. D).
- 4 Fissare posteriormente (fig. E) e anteriormente (fig. F) sul cuscino la cintura girospalla e tenderla facendola scorrere nell'apposita fibbia autobloccante. Assicurarsi che il manicotto di protezione del collo sia posizionato correttamente.




softab 45° / 70°

REF.84500

Shoulder brace with immobilizer in abduction of 45°/70°



OPTION: REF. 84500/A
Handauflageschiene
Hand and wrist support
Tige d'appui pour poignet et main
Стержень для поддержки запястья и кисти руки
Wsparcie dla dłoni i nadgarstka
Asta di appoggio per polso e mano

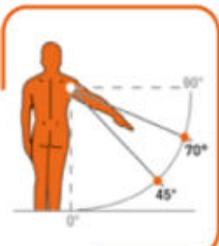

Möglichkeit zur Abduktion von 45° oder 70°
Abduction at 45° or 70°
Possibilità d'abduzione à 45° ou 70°
Возможность отвода на 45° или 70°
Odwodzenie pod kątem 45° lub 70°
Possibilità di abduzione a 45° o 70°