

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

- REF.90132 - Epilastik32 Gomitiere elastica in maglia
 REF.90119 - Manulastik19 Polsiera elastica in maglia
 REF.90104 - Genulastik04 Ginocchiera elastica in maglia
 REF.90137 - Malleolastik37 Cavigliera elastica in maglia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere o (ref.90104) forti campi elettromagnetici. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. Cortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti

SCELTA/DIMENSIONI

Codice	REF.90132						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonferenza avambraccio presa a 13 cm dall'epicondilo	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31
Colore	blu						

ambidestro

Codice	REF.90119						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonferenza polso cm	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Colore	blu						

Indicare destro o sinistro

Codice	REF.90104							
Taglia	0	1	2	3	4	5	6	7
Circonf. coscia presa 14 cm sopra centro rotulea cm	35/38	38/41	41/44	44/47	47/50	50/53	53/56	56/59
Circonf. polpaccio presa 12 cm sotto centro rotulea cm	25/28	28/31	31/34	34/37	37/40	40/43	43/46	46/49
Colore	blu							

ambidestro

Codice	REF.90137						
Taglia	0	1	2	3	4	5	6
Circonferenza caviglia cm	15/17	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29
Colore	blu						

ambidestro

MANUTENZIONE

- ☒ Non candeggiare ☒ Pulizia chimica non consentita
 - ☒ Non stritare ☒ Non asciugare in asciugatrice
- ☒ Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30°C con sapone neutro lasciare asciugare lontano da fonti di calore

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

- Epilastik 32** • Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite.
- Manulastik 19** • Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso.
- Genulastik 04** • Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condromalacia femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva.
- Malleolastik 37** • Traumi distorsivi della tibia tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede e dei peronei.

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conoscenza

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Struttura in maglia dinamica, con settori a compressione differenziata • Disegno anatomico
- Epilastik 32** • Inserti in silicone con scarichi per l'epicondilo e l'epitroclea e pressori sull'avambraccio
- Bordo braccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.
- Manulastik 19** • Foro per il pollice • Stecca palmare in materiale polimerico • Cinturino di chiusura a velcro al polso • Inserto in silicone per l'alloggiamento del processo stiloideo • Bordo avambraccio rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.
- Genulastik 04** • Stabilizzatore rotuleo in silicone • Sottili stecche laterali anti-migrazione per mantenere in posizione la ginocchiera • Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.
- Malleolastik 37** • Inserti in silicone per l'alloggiamento dei malleoli • Bordo superiore rinforzato da un cordino in silicone per dare morbidezza e resistere alla trazione durante l'applicazione.

APPLICAZIONI

- Epilastik 32** 1 Infilare la gomitiere con l'etichetta verso l'alto: la parte più voluminosa dell'inserto silconico deve poggiare sull'avambraccio. 2 Posizionarla in modo che i fori presenti nell'inserto silconico siano centrati su epicondilo ed epitroclea.
- Manulastik 19** 1 Infilare la polsiera con l'etichetta verso l'alto. 2 Posizionarla in modo che il pollice si infili nell'apposito foro e che la stecca rigida sia dal lato del palmo della mano. 3 Chiudere a Velcro® il cinturino del polso.
- Genulastik 04** 1 Infilare la ginocchiera con l'etichetta verso l'alto. 2 Posizionarla in modo che la rotula si collochi nell'apposita sede all'interno dello stabilizzatore in silicone.
- Malleolastik 37** 1 Infilare la cavigliera con l'etichetta verso l'alto. 2 Posizionare la cavigliera in modo che i malleoli si collochino nelle apposite sedi all'interno degli inserti in silicone.

epilastik 32 **manulastik 19**

genulastik 04 **malleolastik 37**

linealastik

REF.90132 - Epilastik32
Elasticated fabric elbow support

REF.90119 - Manulastik19
Elastic wrist support

REF.90104 - Genulastik04
Mesh elastic knee brace

REF.90137 - Malleolastik37
Elastic knit ankle support



REF.90119 - Manulastik19