

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

- REF. 460 Ginocchiera tubolare corta**
- REF. 463 Ginocchiera tubolare corta con foro rotuleo**
- REF. 404N Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo**
- REF. 416 Ginocchiera in neoprene per stabilizzazione rotulea**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
 Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
 Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO
 Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE
 È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali. Per garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura. Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

ASSORTIMENTO/TAGLIE

Codice	REF. 460 - REF. 463					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44/47
Circonf. centro ginocchio cm	26	26	26	26	26	26
Lunghezza cm	nero REF.460 - nero e blu REF.463					
Colore	Ambidestro					

Codice	REF. 404N - REF. 416					
	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Circonf. centro ginocchio cm	33	33	33	33	33	33
Lunghezza cm	nero e blu REF.404N - nero REF. 416					
Colore	Ambidestro					

MANUTENZIONE
 ☼ Non candeggiare ☼ Pulizia chimica non consentita
 ☹ Non stirare ☹ Non asciugare in asciugatrice
 🧼 Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30°C con sapone neutro; lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

- Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.
- INDICAZIONI REF. 460/463/404N**
- Gonalgie dovute a contusioni
 - Iniziali stati artrosici
 - **Solo REF. 460:** Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
 - Tendiniti
 - **Solo REF. 463:** Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva
 - Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
 - **Solo REF. 404N**
 - Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
 - Lieve instabilità rotulea
 - Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

- INDICAZIONI REF. 416**
- Gonartrosi
 - Artrrosi femoro-rotulea
 - Instabilità latero-mediale della rotula

- CONTROINDICAZIONI**
 Al momento nessuna conosciuta
- CARATTERISTICHE E MATERIALI**
- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
 - Soffice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione
 - Lavabile
 - **Solo REF. 463:** Foro rotuleo a contorno rinforzato per stabilizzare la rotula
 - **Solo REF. 404N:** Tasca periotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo
 - **Solo REF. 416**
 - Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a "J" in materiale espanso
 - Tiranti con chiusura a velcro
 - Stecche a spirale laterali e mediali

- MODALITÀ DI APPLICAZIONE REF. 460/463**
- 1 Infilare il tubolare sul ginocchio con la scritta verso l'alto.
 - 2 **Modello REF. 460** (fig. A): posizionare la ginocchiera in modo che le cuciture risultino in posizione laterale.
 - Modello REF. 463** (fig. B): posizionare la ginocchiera in modo che la rotula si collochi perfettamente nel foro.



REF.460
 Short tubular knee brace
REF.463
 Short tubular knee brace with patella stabilizer

object 60/63/04



B
REF. 463