

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

Ginocchiera corta per instabilità rotulea

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e sicuro del dispositivo medico.

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI

Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V.

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del prodotto sull'etichetta interna. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE

È consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico.

La responsabilità del fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L'ortesi è fatta per l'utilizzo da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico e, in caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all'autorità competente del proprio Stato. L'efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l'utilizzo di tutte le sue componenti.

ASSORTIMENTO/TAGLIE

Codice	REF.90010					
Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonf. centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/53
Colore	nero					
ambidestro						

MANUTENZIONE

⚠ Non candeggiare ☒ Pulizia chimica non consentita

⚠ Non stirare ☒ Non asciugare in asciugatrice

📖 Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30° con sapone neutro; lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

INDICAZIONI

- Gonalgie dovute a contusioni
- Iniziali stati artrosici
- Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
- Lieve instabilità rotulea
- Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

CONTROINDICAZIONI

Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI

- Multifunzionale: grazie alla sua reversibilità, questa ginocchiera può essere indossata indifferentemente su entrambi gli arti
- Stabilizzatore rotuleo a C in materiale espanso per instabilità di grado lieve.
- Grazie alla pratica funzione double-face può essere posizionato sia lateralmente che medialmente
- Foro rotuleo
- Struttura in neoprene ortopedico, nero a basso profilo
- Bordo confortevole

APPLICAZIONE

PRIMA APPLICAZIONE PER IL MEDICO / TECNICO

- 1 Disporre la ginocchiera secondo il ginocchio (dx/sx) e il tipo di stabilizzazione (laterale/mediale) desiderati. Tenere presente che il logo RO+TEN indica sempre l'alto della ginocchiera e che la C va disposta sul lato da stabilizzare; se necessario rivoltare la ginocchiera (in modo che l'interno diventi l'esterno) (fig. C-H).
- 2 Infilare il tubolare sul ginocchio con il logo RO+TEN verso l'alto (fig. A).
- 3 Posizionare la ginocchiera in modo che la rotula si collochi perfettamente nel foro (fig. B).

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

- 1 Infilare il tubolare sul ginocchio con il logo RO+TEN verso l'alto (fig. A).
- 2 Posizionare la ginocchiera in modo che la rotula si collochi perfettamente nel foro (fig. B).



REF.90010

Short knee brace for patella instability

object 10

