

TORDEN SURGI

Detergente enzimatico per strumenti chirurgici

Composizione:	Enzimi Proteolitici concentrati g 0.5 Tensioattivi non ionici g 25 Alcool etilico g 5 Acqua q.b. a g 100
Aspetto: Profumo: pH:	Liquido lievemente rosato Caratteristico 9,2
Biodegradabilità:	Oltre il 90%
Confezione:	- Flacone da lt 1 in cartoni da 12 flaconi
Proprietà e Vantaggi:	Attività e tempo d'azione <ul style="list-style-type: none">▪ Detersione di strumenti chirurgici ed odontoiatrici, materiali in vetro, plastica, metallo. Agisce in 10 minuti in acqua tiepida. Tollerabilità: <ul style="list-style-type: none">▪ E' ben tollerato dalla cute. Controindicazioni: <ul style="list-style-type: none">▪ Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.
Indicazioni d'uso	Agitare prima dell'uso; Diluire al 2% (pari a 20 ml per litro con apposito dosatore) in acqua tiepida (25°C); Lasciare gli strumenti in immersione per 10 minuti; Risciacquare. Modalità di conservazione: <ul style="list-style-type: none">▪ Validità 24 mesi dalla data di confezionamento. Nella sua confezione originale non si altera nel tempo. Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.
Applicazioni:	La soluzione di TORDEN SURGI può essere usata anche in apparecchi ad ultrasuoni;